

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ С ЦЕЛЬЮ
ЭКСПЕРТНОЙ ПРОВЕРКИ ПРОГРАММЫ
«Моби Лэнд»**

Содержание

1. Общие сведения по установке программы «Моби ЛЭНД».....	3
2. Установка программы «Моби ЛЭНД».....	3

1. Общие сведения по установке программы «Моби ЛЭНД»

Для установки программы вставьте USB-ключ в USB-порт, после этого появится окно установки. Если этого не произошло, запустите файл установки (файл в формате .exe в главной папке USB-ключа).


Далее следуйте инструкциям *Менеджера распаковки программы*.

В ходе установки менеджер автоматически запустит установку следующих компонентов:


- .Net Framework 4.5
- Microsoft Visual C++ 2017

2. Установка программы «Моби ЛЭНД»

1. Нажмите кнопку *Установить*.

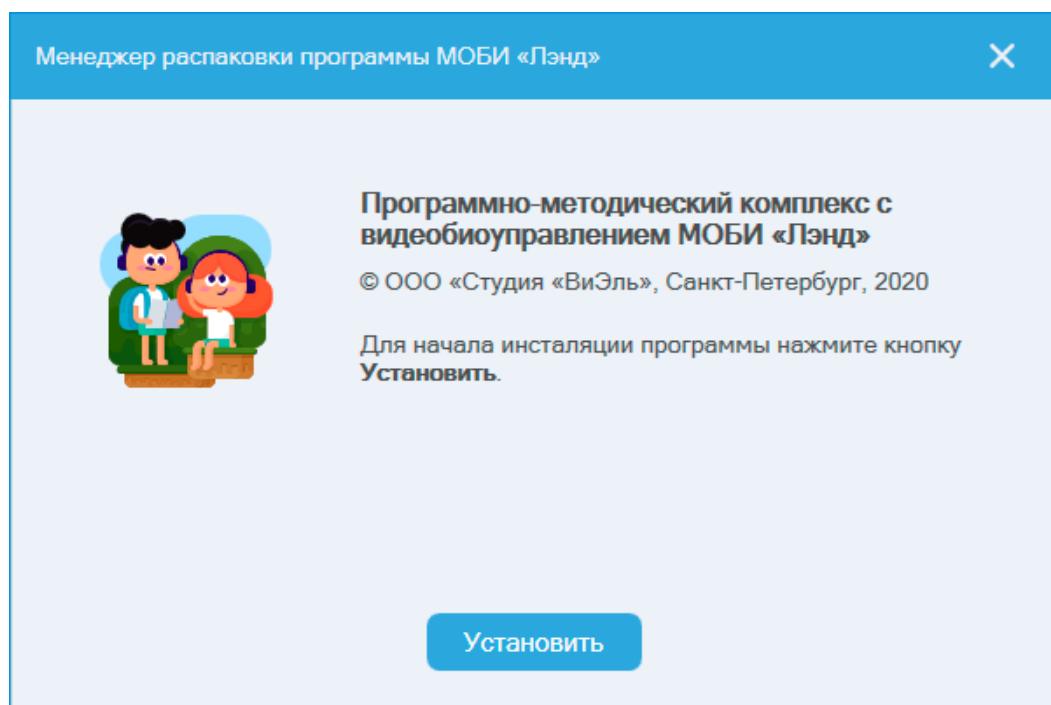


2. Для корректной работы ПО необходимо нажать кнопку *Установить* для установки вспомогательных компонентов. Экран может быть автоматически пропущен, если необходимые компоненты уже установлены.

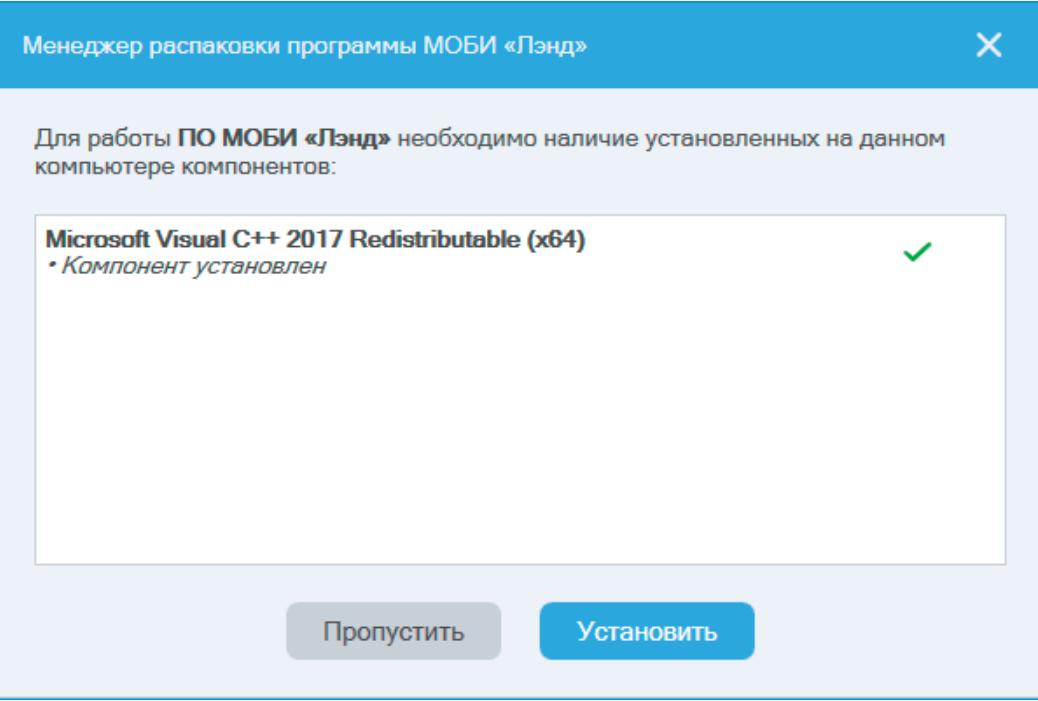


ВАЖНО! По завершению установки компонента, если он потребует перезагрузку ПК, нужно **отказаться от перезагрузки** и перезагрузить ПК самостоятельно только после завершения установки программы.


3. Папку установки можно изменить, нажав кнопку *Обзор*. Продолжить установку программы можно, нажав кнопку *Продолжить*

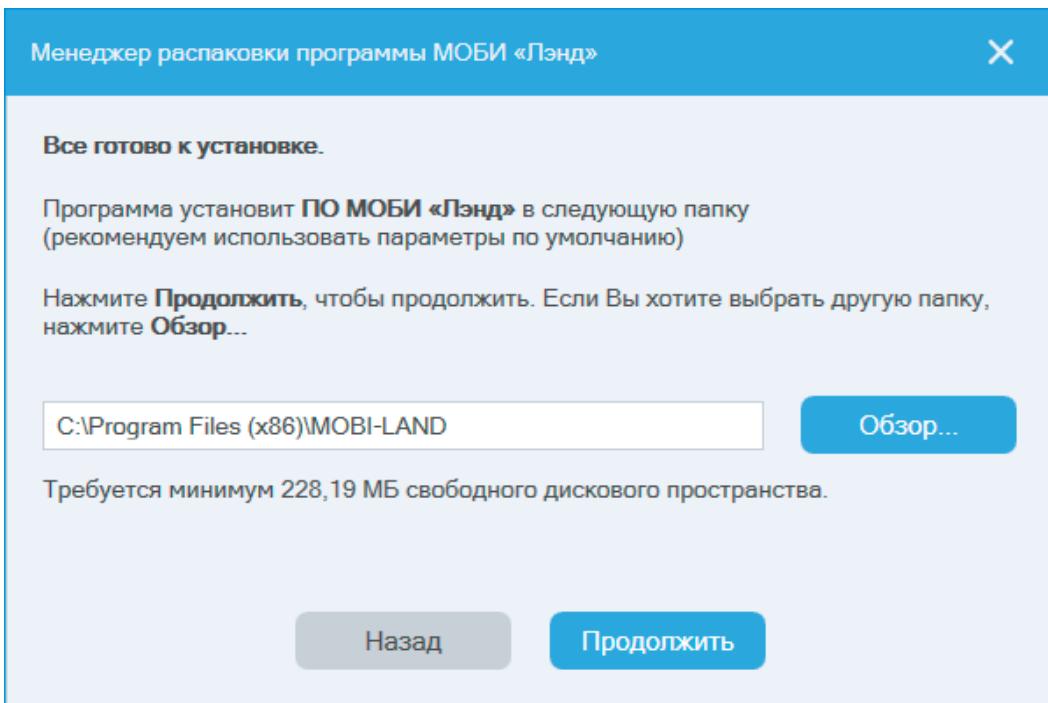

4. Нажмите кнопку *Установить* для запуска процесса установки

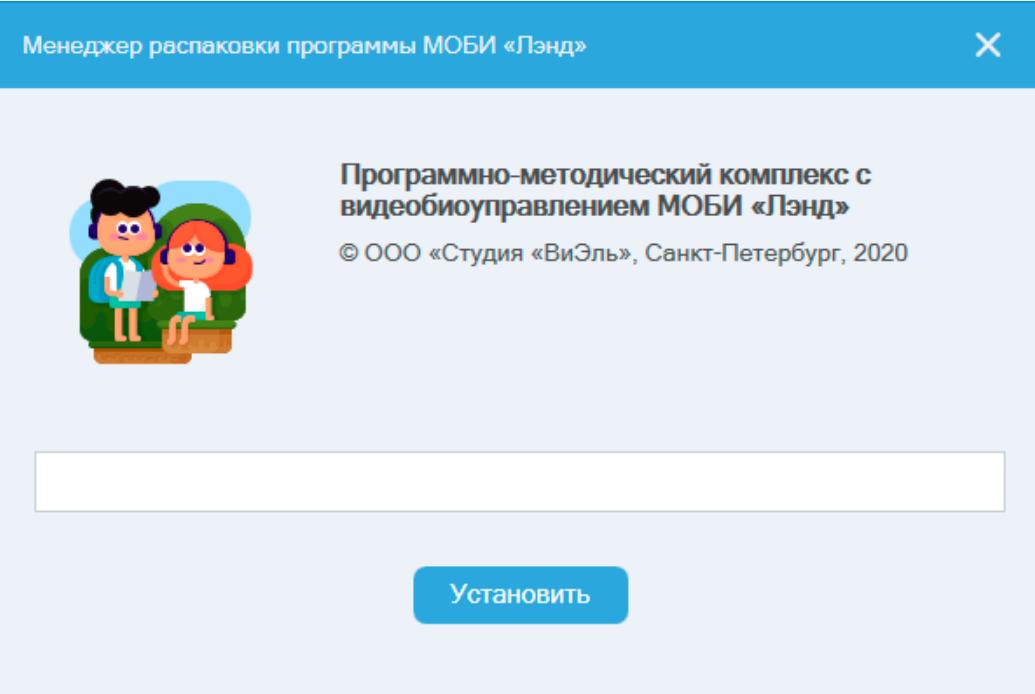

5. В появившемся окне выберите желаемые действия из списка и нажмите кнопку *Продолжить*

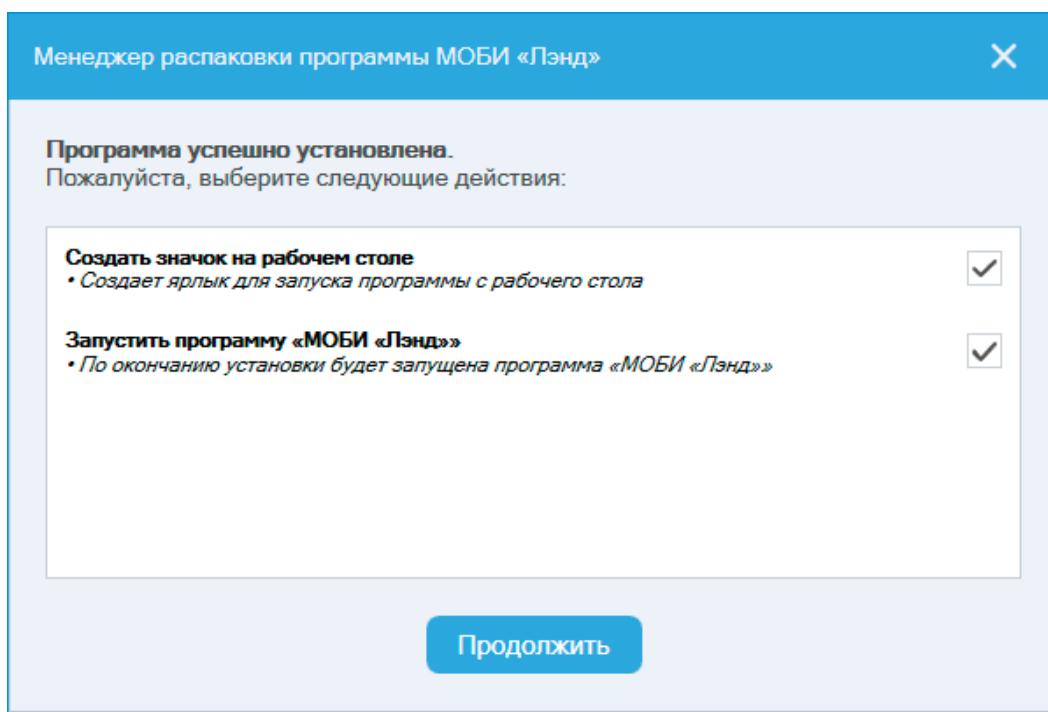

6. После нажатия кнопки *Готово* менеджер распаковки завершит работу



Программно-методический комплекс с
видеобиоуправлением МОБИ «Лэнд»

© ООО «Студия «ВиЭль», Санкт-Петербург, 2020

Менеджер успешно завершил работу.

По вопросам продаж и поддержки: test-psv.ru

Для выхода нажмите кнопку Готово.

Готово

Если ПО уже было установлено, то откроется окно, с кнопками *Удалить ПО* или *Установить компоненты*.



Программно-методический комплекс с
видеобиоуправлением МОБИ «Лэнд»

© ООО «Студия «ВиЭль», Санкт-Петербург, 2020

Выберите действие:

[Установить компоненты](#)

[Удалить программу](#)

Важно! Установленная программа работает только при наличии оригинального **USB-ключа**, вставленного в **USB-порт**.